



## NÁVOD K POUŽITÍ

### Calciplus LC

#### Obecné informace:

Calciplus LC je světlem tuhnoucí léčivý podkladový materiál – liner. Obsahuje hydroxid vápníku v uretan-dimetakrylátové pryskyřici. Přesné umístění Calciplus LC umožňuje jeho použití ve všech preparacích hlubokých kavit. Patentované složení hydrofilní pryskyřice vytváří stabilní a trvanlivou podložku nebo bázi.

#### Indikace k použití:

- 1) Calciplus LC je určen k použití jako prostředek pro přímé překrytí pulpy.
- 2) Calciplus LC je určen jako nepřímý prostředek pro překrytí pulpy v hlubokých preparacích, ochranná vrstva v rozsáhlých preparacích, základ nebo uzavírací prostředek pro použití:
  - Pod amalgámové výplně
  - V rámci kompozitních výplní třídy I a třídy II
  - Jako ochrana při technice totálního leptání
  - Pod cementy, skloionomery
  - Jako báze nebo podložka u výplní dočasných zubů

#### Kontraindikace:

Pokud nelze vytvořit suché pracovní pole nebo nelze použít stanovenou pracovní techniku.  
Pokud je známo, že pacient je alergický na kteroukoli složku přípravku.

#### Calciplus LC aplikace:

- 1) Izolujte preparovaný zub a šetrně vysušte vzduchem.
- 2) Aplikujte Calciplus LC přímo na obnaženou pulpu. vrstvením. Hloubka vrstvy by neměla přesáhnout 1 mm.
- 3) Odstraňte přebytky materiálu z okraje skloviny a vytvrzujte světlem každou vrstvu po dobu 20 sekund (dle použité polymerační lampy – dbejte pokynů výrobce lampy).
- 4) Aplikujte adhesivum na sklovinu, aplikujte bond dle pokynů výrobce a pokračujte ve výplni kavity potřebným materiálem dle pokynů výrobce.

#### Další informace:

1. **POZOR:** Po několika hodinách může na hrotu koncovky materiál ztuhnout. Abyste předešli ucpání, mezi každým použitím sejměte špičku a znovu nasadte uzávěr Luer Lock.
2. Před použitím Calciplus LC si pozorně přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
3. Pro každodenní použití skladujte při pokojové teplotě. Skladování je možné i v chladničce.
4. Exponování světlem vede k předčasné polymeraci.
5. Nevytvrzená pryskyřice může způsobit přecitlivělost na metakryláty. Zabraňte opakovanému kontaktu nevytvrzené dentální pryskyřice s pokožkou.

Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na akryláty nebo jiné pryskyřice.

6. Použité koncovky a prázdné stříkačky řádně zlikvidujte.

7. Uchovávejte mimo dosah dětí.

8. Aby se zabránilo křížové kontaminaci, nepoužívejte koncovky opakovaně.

9. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

10. Abyste zabránili křížové kontaminaci, dezinfikujte a otřete aplikační stříkačku mezi použitím dezinfekčním prostředkem nebo použijte jednorázový kryt stříkačky. Pokud používáte kryt stříkačky, odstraňte koncovku, znovu nasadte kryt a zlikvidujte koncovku a kryt stříkačky.

11. Calciplus LC chraňte před teplem/přímým slunečním zářením.

#### Vedlejší účinky:

V jednotlivých případech mohou složky Calciplus LC vést ke zvýšené citlivosti. Calciplus LC by se v takových případech neměl používat. Aby se předešlo možnému podráždění pulpy, měly by být oblasti v blízkosti pulpy chráněny vhodným chráničem pulpy/dentinu (selektivně aplikujte přípravek na bázi hydroxidu vápenatého na oblasti blízko pulpy).

#### Interakce

Látky obsahující eugenol/hřebíčkový olej mohou inhibovat polymeraci kompozitních materiálů. V důsledku toho je třeba se vyhnout aplikaci těchto materiálů v souvislosti s Calciplus LC. Kationtové ústní vody a látky odhalující plak, stejně jako chlorhexidin mohou způsobit změnu barvy.

#### Skladování:

Skladujte při teplotě 1–30 °C

#### Likvidace:

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Odneste na schválenou skládku odpadů / do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

#### Nevyčištěné obaly:

Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

#### Upozornění:

Calciplus LC obsahuje polymerovatelné methakrylátové monomery. Vyhněte se dlouhodobé expozici pokožky, měkkých tkání úst a očí. Nezpolymerovaný Calciplus LC může mít mírné dráždivé účinky a může vést ke senzibilizaci vůči methakrylátům. Běžné lékařské rukavice neposkytují ochranu proti senzibilizačnímu účinku methakrylátů. Koncovky aplikátoru jsou na jedno použití.

Balení: 2 x 2g ve stříkačce

#### **Dovozce a distributor:**

Janouch Dental s.r.o.  
Hradištská 161  
735 62 Český Těšín  
e-mail: [info@janouch-dental.cz](mailto:info@janouch-dental.cz)

