

OliREVO

TECHNOLOGIE NANO-PLNIV

CZ NÁVOD K POUŽITÍ



POPIS PRODUKTU

Světlem tuhnutí RTG kontrastní (sklovina: ~200 % Al, dentin: ~100 % Al) kompozit s nano-plnivými pro přední a zadní výplně. Kromě nízkého smrštění a nízkého otěru vykazuje vynikající manipulační a mechanické vlastnosti. Kompozit splňuje normu DIN EN ISO 4049, typ 1, třída 2, skupina 1.

SLOŽENÍ

uretandimethakrylátová pryskyřice
Obsah plniva: 82 % hmotn. (74 % obj.)
anorganická plniva (<1,0 μm)

INDIKACE / URČENÉ POUŽITÍ

Výplně kavit všech tříd.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Funkční vlastnosti produktu splňují požadavky zamýšleného použití.

KONTRAINDIKACE

Přímý kontakt s pulpou může způsobit podráždění. Je doporučeno pokrýt oblasti v blízkosti pulpy tenkou vrstvou materiálu pro překrytí pulpy.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby, které jsou ošetřovány během stomatologického výkonu.

URČENÍ UŽIVATELÉ

Tento zdravotnický prostředek by měl používat pouze odborně vyškolený zubní lékař.

NEKOMPATIBILITA S JINÝMI MATERIÁLY

Nepoužívejte v kombinaci s látkami obsahujícími eugenol, protože eugenol

inhibuje polymeraci kompozitu. Neskladujte kompozitní materiál v blízkosti produktů obsahujících eugenol, ani nedovolte, aby kompozit přišel do styku s materiály obsahujícími eugenol.

APLIKACE

1. Preparace zubu a sladění barev

Před preparací a výběrem odstínu vyčistěte zub leštící pastou bez fluoridů.

Zjistěte odstín zubů, dokud jsou zuby vlhké, a vyberte vhodný odstín kompozitu OliREVO.

OliREVO je odstínováno podle VITA®-Shades. Je k dispozici také ve speciálních odstínech a odstínech bleach.

2. Preparace kavity

Po izolaci (nejlépe kofferdamem) připravte kavitu s minimální redukcí zubu.

Pro ochranu pulpy by měly být oblasti v její blízkosti pokryty tenkou vrstvou materiálu na bázi hydroxidu vápenatého.

Kondicionujte a aplikujte bond podle pokynů výrobce. Doporučuje se technika *total etch* leptacím gelem (např. OliEtch) a následná aplikace světlem tuhnutí bondu (např. OliBOND). Jinak před aplikací OliREVO použijte samoleptací bond (např. OliEtch BOND).

3. Aplikace a vytvrzování OliREVO

Naneste OliREVO ve zvoleném odstínu. OliREVO se snadno modeluje. Umístěte jej pomocí vhodného nástroje. Lze použít matricové pásky.

V případě hlubokých a rozsáhlých kavit se nejlepších výsledků dosáhne vytvořením podložky pomocí světlem tuhnutí

cementu modifikovaného pryskyřicí nebo světlem tuhnoucího tekutého kompozitu (např. OliFlow), s následnou aplikací OliREVO. V případě malých kavit lze OliREVO aplikovat přímo.

Pro optimální výsledek nanášejte OliREVO ve **vrstvách max. 2 mm**. Vytvrzujte světlem každý přírůstek samostatně.

S použitím polymerační jednotky (rozsah vlnových délek 400-500 nm) s **intenzitou světla alespoň 1000 mW/cm²** vytvrzujte každý přírůstek následovně:

– světlejší odstíny (např. A1, A2, C2)
20 sekund

– tmavší odstíny (např. A3.5, B3)
30 sekund

Přidržte okénko pro vyzařování světla co nejbližší k výplňovému materiálu.

4. Dokončení

V závislosti na tvaru oblasti konturujte pomocí dokončovacích diamantů, flexibilních kotoučů nebo tvrdokovových fréz. Vyleštěte do vysokého lesku pomocí leštících kotoučů nebo leštících kartáčků.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Ihned po použití stříkačku uzavřete, aby nedošlo k vystavení přípravku světlu.

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY / VAROVÁNÍ

- Aplikační špičky jsou z hygienických důvodů pouze na jedno použití.
- Okolní světlo dentální lampy může zahájit polymeraci kompozitu.
- K úpravě viskozity kompozitní výplně nepoužívejte žádnou pryskyřici.
- Zabraňte kontaktu s kůží, sliznicemi a očima.
- Nevytvrzený kompozit může mít dráždivé účinky a může způsobit senzibilizaci vůči methakrylátům.

- Komerční lékařské rukavice nechrání před senzibilizačním účinkem metakrylátů.
- VITA® je registrovaná ochranná známka společnosti VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo.
- Udržujte mimo dosah dětí!

LIKVIDACE

Produkt zlikvidujte v souladu s předpisy místních úřadů.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích musí být závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, hlášeny výrobci a příslušnému úřadu.

ZÁRUKA

SanaPro Dental GmbH zaručuje, že tento produkt je bez vad materiálu a výroby. SanaPro Dental GmbH neposkytuje žádné další záruky, včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti produktu pro danou aplikaci. Pokud je tento produkt vadný během záruční doby, vaším výhradním právem a jedinou povinností výrobce je oprava nebo výměna produktu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon, SanaPro Dental GmbH nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé používáním tohoto produktu, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou teorii, včetně záruky, smlouvy, odpovědnosti za nedbalost nebo objektivní odpovědnosti.

BALENÍ


1x stříkačka 4g

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



 **OLIDENT**

 Výrobce:
SanaPro Dental GmbH, Stresemannstrasse 46 27570
Bremerhaven, Německo


 Olident Sp.z o.o., Podłęże 653, 32-003 Podłęże, Poland,
www.olident.com

 0482

 Zdravotnický
prostředek

Scan  to find out more



 MADE
in
GERMANY

Verze: 1_EN_DE_PL_13012023SP
Přeloženo dne 23.8.2023