



NÁVOD K POUŽITÍ

PANORA 200 leptací gel



Popis

PANORA 200 je gel používaný pro leptání skloviny a kondicionování dentinu ve spojení s pečetěním a přímými kompozitními náhradami a také adhezivní cementaci laboratorně vyrobených celokeramických nebo kompozitních náhrad.

Složení

PANORA 200 obsahuje 37% kyselinu fosforečnou, zahušťovadlo a barevné pigmenty.

Doporučené indikace

PANORA 200 je určen leptání zubní substance v rámci techniky naleptání skloviny nebo dentinu pro následující indikace:

- Aplikace výplní
- Přímá kompozitní dostavba
- Adhezivní cementace inlay (kompozitní, celokeramické), korunek, můstků, fazet, adhezivních můstků a čepů kořenových kanálků
- Dlahy
- Lepení ortodontických zámků

Kontraindikace

Pokud nelze použít předepsanou aplikační techniku.

Vedlejší efekty

Dle dosavadních průzkumů nejsou žádné.

Interakce

Vložky na bázi skloionomeru lze rozpustit pomocí Total Etch.

Aplikace PANORA 200:

Aplikujte PANORA 200 na sklovinu a následně na dentin. Doporučuje se použití kofferdamu. Vyhněte se jakémukoli kontaktu s měkkou tkání (pokožka, ústní sliznice, oči atd.)

Kavita by měla být suchá a zbavená nečistot, přičemž by se mělo předejít přesušení dentinu.

Po aplikaci gelu nechte působit na *dentin* po dobu **15 sekund**.

Reakční doba na *nepřipravenou sklovinu* (např. tmelý fisur) je **30–60 sekund**. Pokud je sklovina selektivně leptaná, použijte reakční dobu **15–30 sekund**.

Po ošetření důkladně opláchněte leptadlo proudem vody a osušte povrch zubů vzduchem bez obsahu oleje a vody.

Naleptaná sklovina by měla mít křídově bílý vzhled. Pokud tomu tak není, opakujte postup leptání s kratší reakční dobou.

Pokud dojde k náhodnému znečištění povrchu zubu, opakujte postup leptání s reakční dobou max. 10 sekund.

Skladování

Nepoužívejte leptací gel po datu expirace.

Skladovací teplota: 1–30 °C

Velké zásoby chladte na 2–8 °C

Likvidace: Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. Uložte na schválenou skládku nebo do spalovny odpadu za podmínek schválených místním úřadem.

Nevyčištěné obaly: Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy

Upozornění

Držte mimo dosah dětí! Pouze pro použití ve stomatologii!

Leptací gel obsahuje kyselinu fosforečnou a je žíravý. Vyhněte se kontaktu s očima, sliznicemi a kůží (pro pacienty i asistenty se doporučuje použít ochranné brýle). Po kontaktu s očima okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékaře/očního lékaře. Po kontaktu s pokožkou okamžitě opláchněte mýdlem a vodou. Po kontaktu s citlivými materiály (povrchy, oděvy) okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Balení: 50ml / 12ml / 5ml / 3ml

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.

Hradištská 161

735 62 Český Těšín

e-mail: info@janouch-dental.cz

